





Инструкция по установке драйвера адаптера флэш-карты и настройке программы чтения архивов RiCom




1. Подключите адаптер с флэш картой к USB-порту Вашего компьютера. 
2. После того, как операционная система сообщит об обнаружении нового устройства "Adapter PC USB", появится диалоговое окно *Мастера установки нового оборудования*. Необходимо выбрать *Установка из указанного места* и нажать кнопку *Далее*

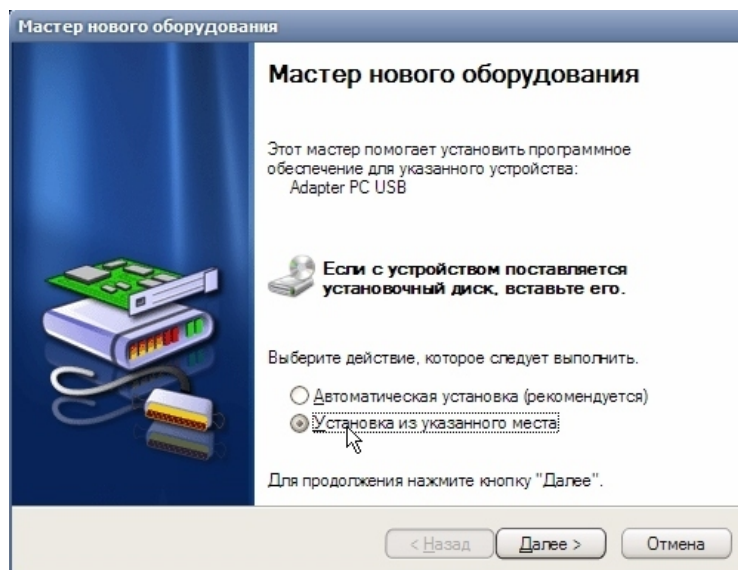


3. В открывшемся окне нужно поставить галочку *Включить следующее место поиска* и нажать кнопку *Обзор*

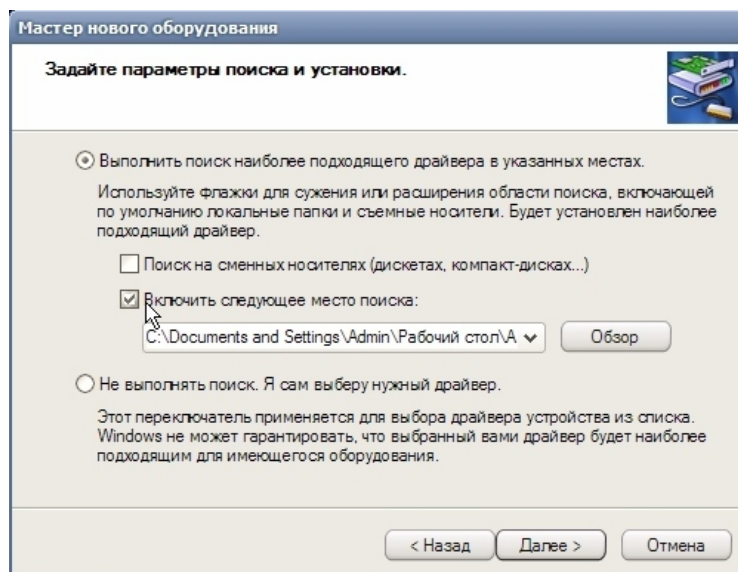



4. Выберите папку с драйвером, нажмите *Ок*, затем *Далее*

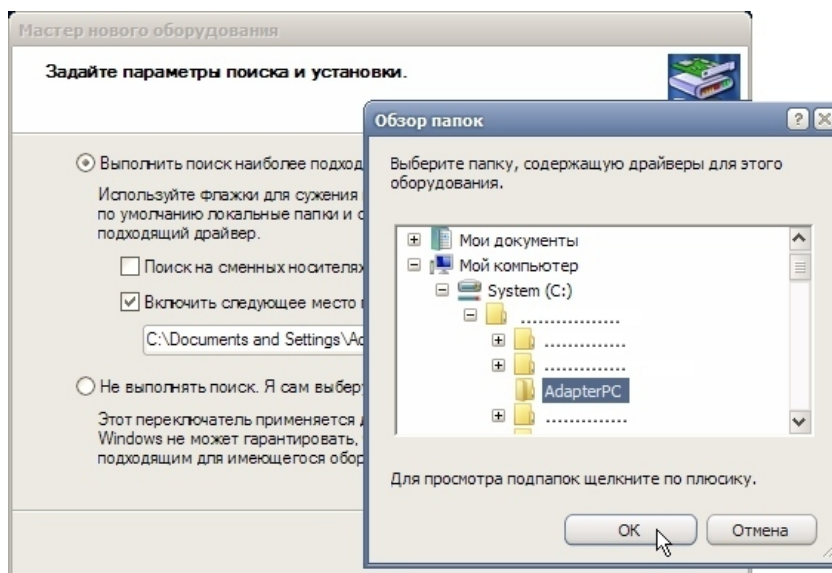


5. Если при установке драйвера появится предупреждение о том, что данное ПО не тестировалось на совместимость с Windows XP, то Вам нужно нажать кнопку *Все равно продолжить*. Установка драйвера продолжится

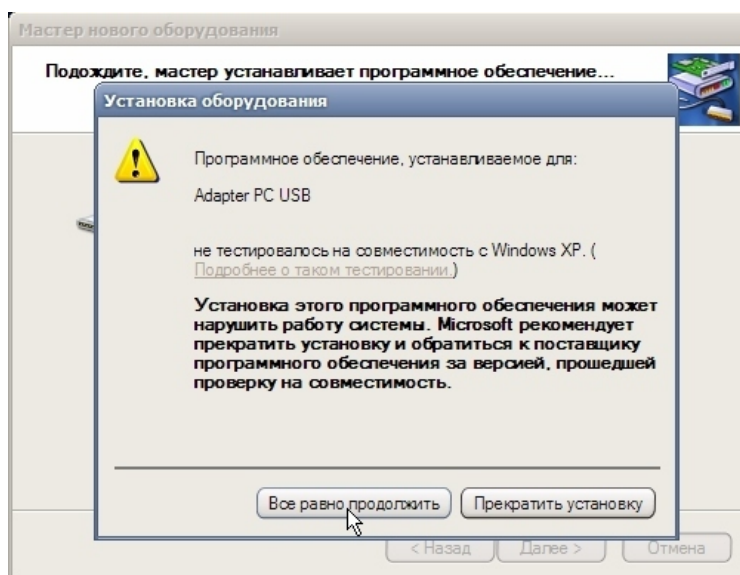


6. После окончания установки нажмите *Готово*

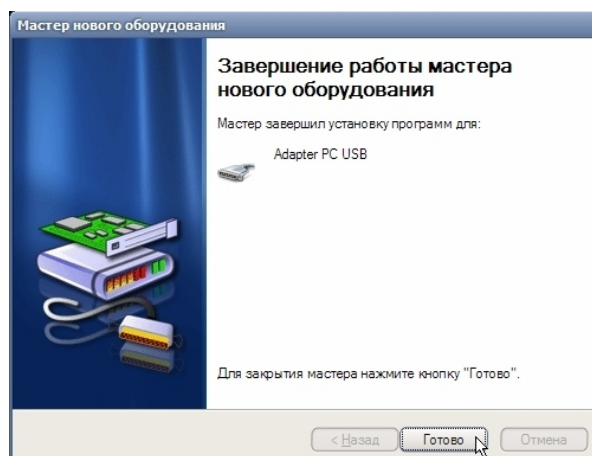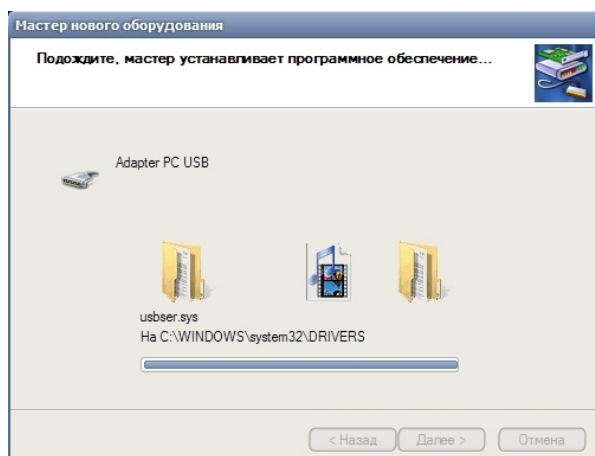


7. Далее необходимо определить номер COM-порта присвоенный операционной системой адаптеру флэш-карты. Для этого щелкаем правой кнопкой мыши по ярлыку *Мой компьютер* и в выпавшем меню выбираем *Управление*

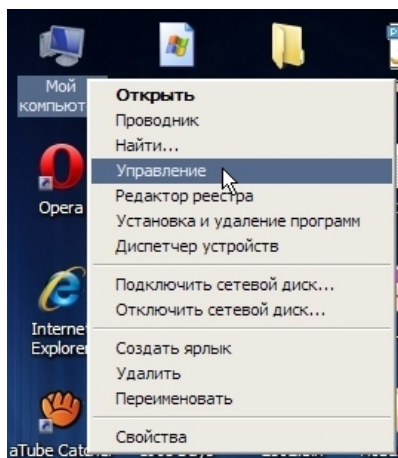

8. В левой части открывшегося окна выбираем *Диспетчер устройств*

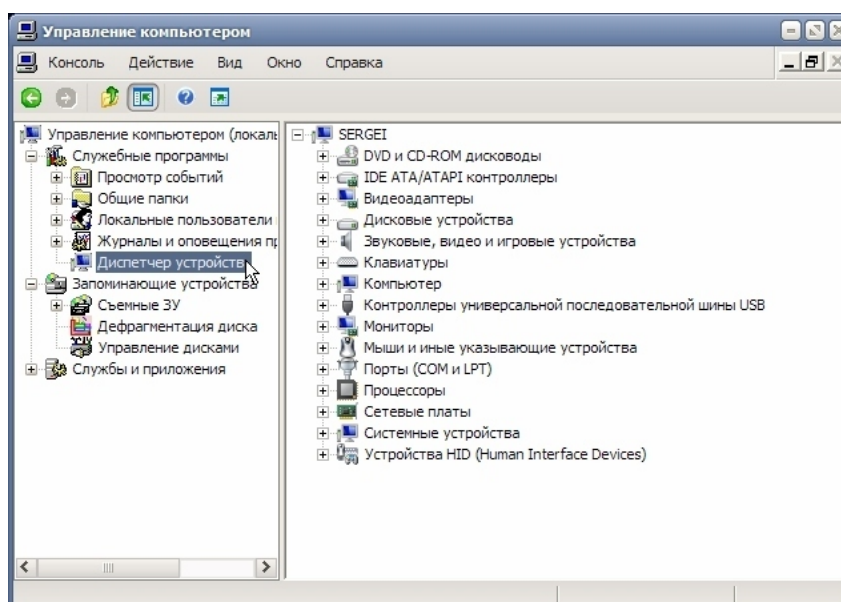


9. В правой части двойным щелчком мыши по параметру *Порты (COM и LPT)* раскрываем список доступных портов

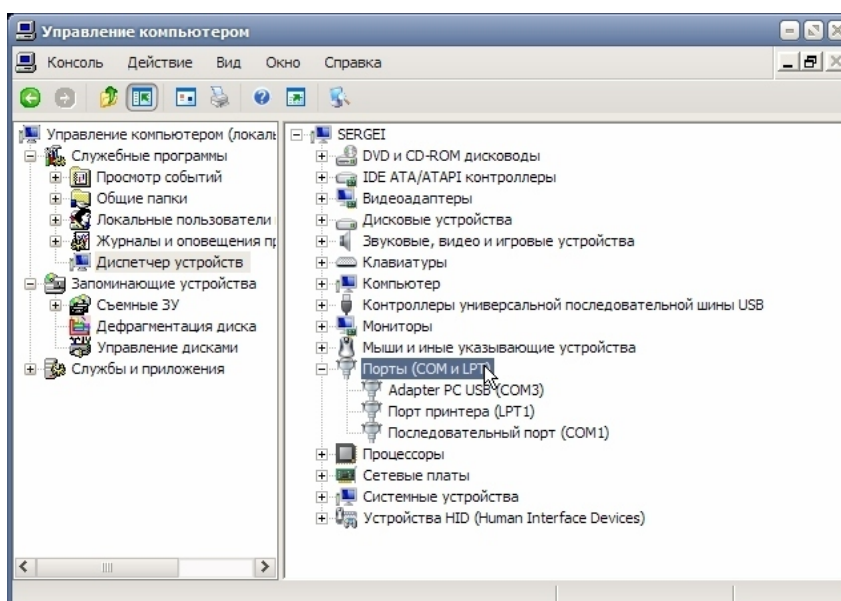



10. В раскрывшемся списке видим наш адаптер “Adapter PC USB” с присвоенным ему номером COM-порта (в данном примере COM-порт № 3).

Запомните номер Вашего COM-порта

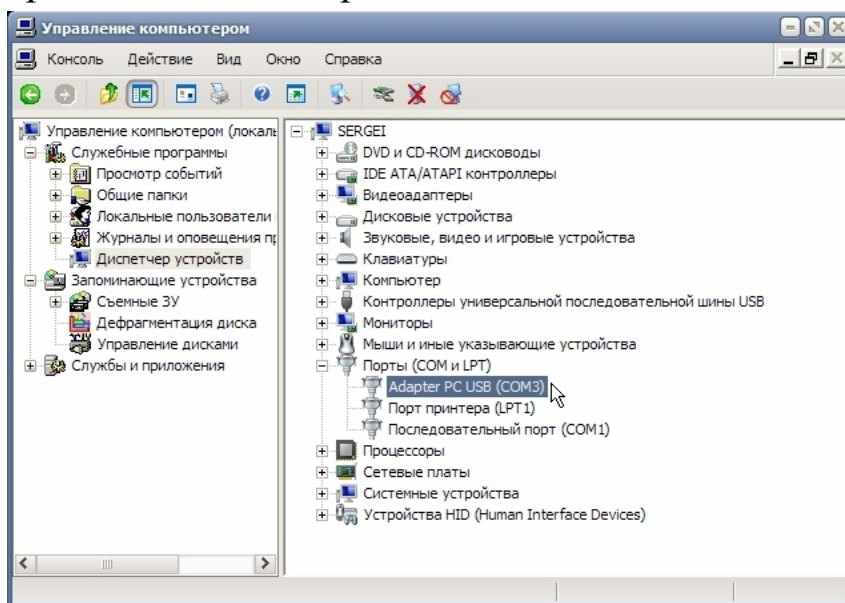

ВНИМАНИЕ! При подключении адаптера флэш-карты к другому USB-порту Вашего компьютера потребуется заново установить драйвер (пункты 1-6 данной инструкции) и номер COM-порта изменится!

11. Запустите программу RiCom

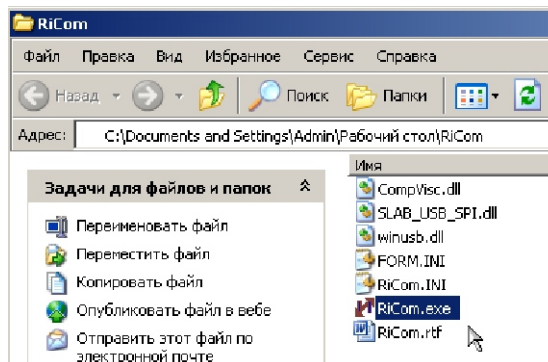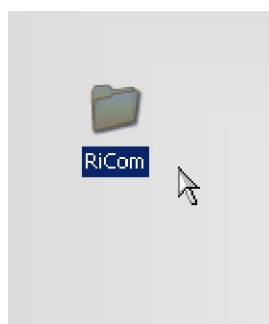


Если при запуске программа “попросит” обновить её, то обновите.

12. Выберите вкладку *Связь* на боковой панели.

В открывшемся окне необходимо всего лишь выбрать протокол обмена *Флэш* и указать номер COM-порта (см. п.10). Дополнительно рекомендуется во вкладке *Настройки* установить опцию *3-страничный отчет* и если вы используете только один прибор Ирвис, то убрать опцию *Показывать окно параметров перед стартом процесса*.


Теперь RiCom готова к формированию отчетов. Настройки производятся один раз, т.к. при закрытии программы настройки сохраняются.

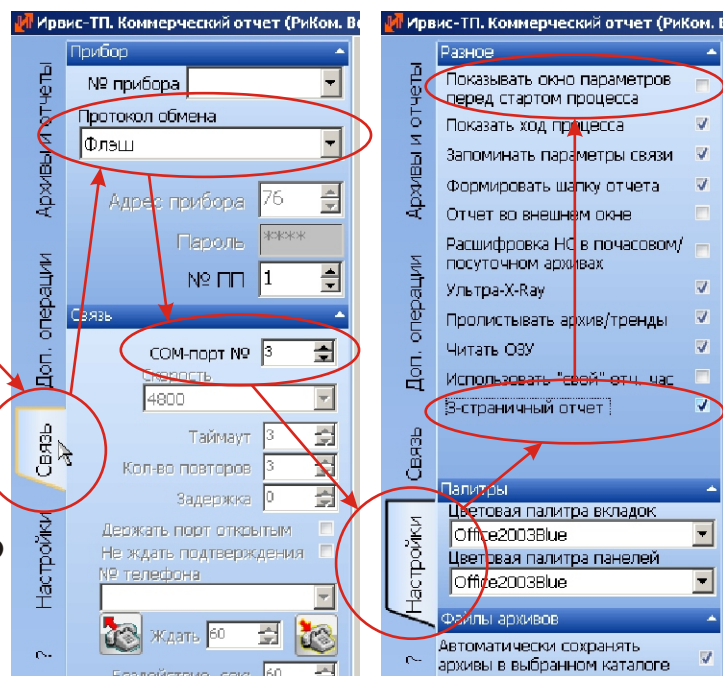

Если вы используете прямое подключение к компьютеру, то установить протокол обмена *ModBus (RS-232/485)*, ввести адрес прибора и скорость.

13. Отчеты создаются в верхней вкладке *Архивы и отчеты* кнопкой *Сформировать отчет*. Тип отчета *Посуточный*, далее выбрать тип периода отчета и использовать встроенный календарь.

Остаётся нажать кнопку *Пуск* и сохранить отчет в формате *pdf* нажав соответствующую кнопку.

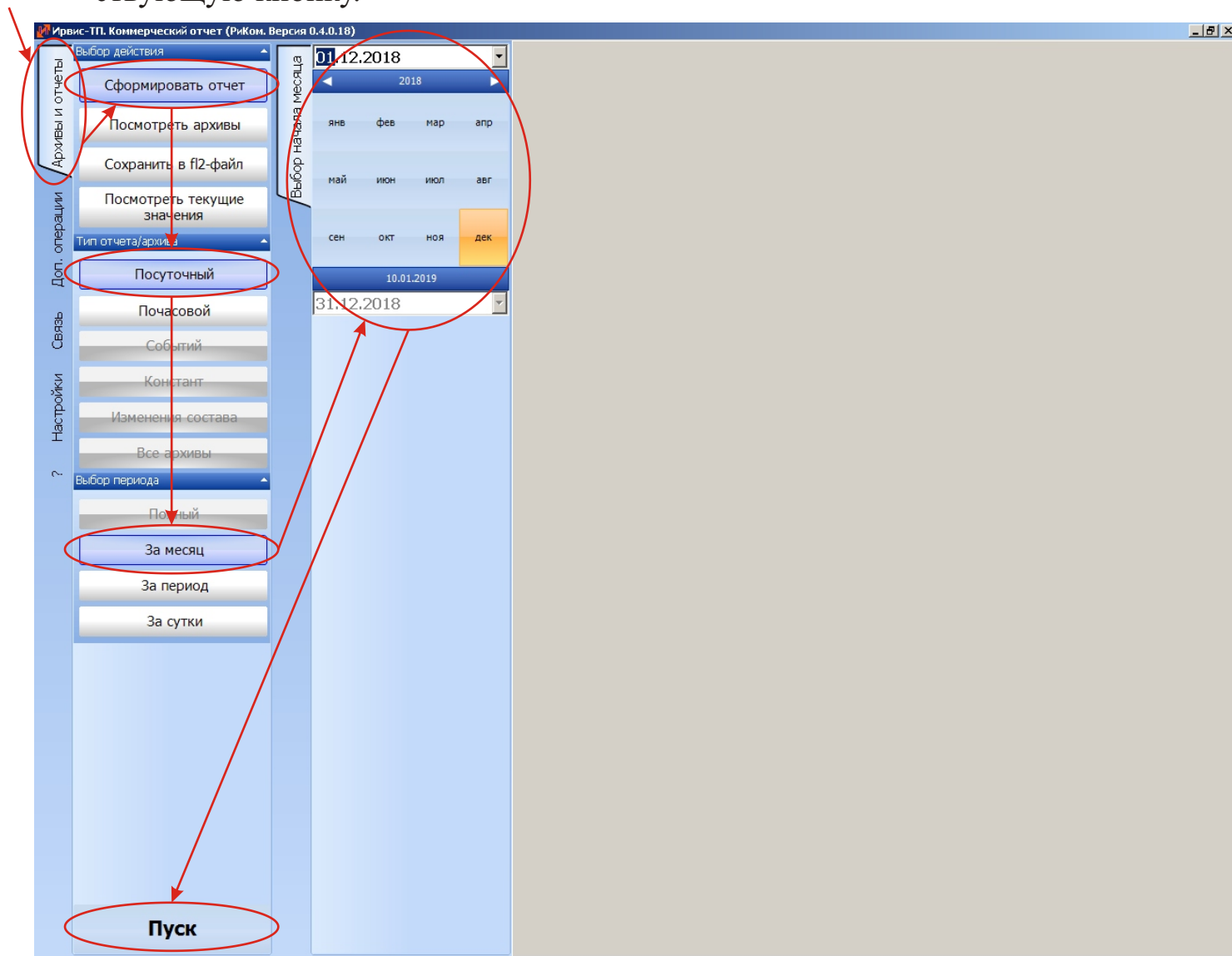

14. Чтобы изучить весь функционал программы RiCom существует встроенная в программу инструкция, которая открывается нажатием кнопки ? .



ООО "Ирвис Север" г.Тюмень тел. 8-904-496-22-68, 8-912-929-13-74, (3452) 540-527
www.irviss.ru irvis72@bk.ru